

GC FIT CHECKER 而至义齿贴合点指示剂

仅供口腔专业人士应用。

适应症：

FIT CHECKER 是专门用来检测修复体的不良接触部位的口腔材料，所有过程可以迅速简便洁净地完成。

1. 全冠：边缘、接触点、咬颌面
2. 铸造桩：接触面
3. 嵌体：边缘以及接触点
4. 全口或局部义齿：粘膜面

禁忌症：

对硅橡胶类印膜材料有过敏使者禁用，发生过敏现象请速到内科医师处就诊。

使用方法：

1. 调拌
挤出等长度的基质和催化剂（全冠或嵌体 1cm，局部义齿 2-3cm），充分调拌 20 秒。
2. 试戴
在修复体组织面均匀涂一层 FIT CHECKER，戴入口中，嘱患者正中颌位做咀嚼动作 3 分钟。
3. 修整
取下修复体检查，不良接触点会表现出过厚或过薄的薄膜厚度。仔细修整这些部分。
4. 清洁修复体

注意：

1. 如果室温较高，请应用阻滞剂以延长操作时间（在调拌前加入）。
2. 本品不可与其他硅橡胶类印膜材料混合使用。

储存：

放置于气温温和处，温度 23℃

避免置于阳光直射处，保质期二年。

包装：

1- 1 包装

80g（64ml）基质

20g（20ml）催化剂

3g 阻滞剂

调拌纸 1 本

塑料调刀 1 把

注意事项：

1. 如果与口腔组织或皮肤接触用清水冲洗。
2. 如果与眼睛接触用清水冲洗，并迅速就诊。

制造商

日本株式会社而至

日本国东京都板桥区莲沼町 76-1

中国大陆售后服务机构

而至齿科（苏州）有限公司

江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

电话：0512-62831516 传真：0512-62833089

执行标准：YZB/JAP 2202-2003《齿科贴合点指示材料》

中华人民共和国医疗器械注册证注册号：国食药监械（进）字 2005 第 2633109 号（更）