

GC SOFT-LINER

义齿重衬材料

在口腔专业医生的指导和建议下使用

[适应症]

用于丙烯酸义齿的重衬。组织调节。(本材料为短期临时义齿修复材料)。

[禁忌症]

极少数患者能引起过敏反应。一旦发生过敏反应，立刻停止使用本产品，并建议去内科医生处治疗。

[使用方法]

1. 预备

用磨石和水清洁接触面并打磨重衬区。

2. 混合

1) 标准的粉液比例是：粉/液为 2.2g/1.8g (1 刻度粉，衡量 4 刻度液)。

注：浓度可以根据粉液比例来调节

2) 测量并放入玻璃杯中混合 30-60 秒

3. 重衬

1) 在义齿表面尽可能均匀的图布一层混和物。

2) 将义齿放入口中，塑性并保持在正中牙合位 4-5 分钟

3) 去除并检查

4) 将义齿浸凉水，再用热的锐利器械修正边缘多余材料。

[储存]

存放于阴凉处，避免光照

保质期：3 年

[包装]

1-1pkg: 粉 100g, 液 100g(97ml), 附属品

[注意]

使用后盖紧瓶盖。

[警告]

如果该材料接触到眼睛，立即用清水冲洗并寻找医生帮助。

制造商

而至陶齿工业株式会社

日本国爱知县春日井市鸟居松町 2 丁目 285 番地

中国大陆售后服务单位

而至齿科(苏州)有限公司

江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

电话:0512-62831516 传真: 0512-62833089

执行标准

YZB/JAP1561-2008 《义齿重衬材料》

中华人民共和国医疗器械注册证注册号:

国食药监械(进)字 2008 第 3631074 号