

CAVITON

亲水性暂封材

在口腔专业医生的指导和建议下使用

[适应症]

是一种暂时性充填材料。

[禁忌症]

极少数患者能引起过敏反应。一旦发生过敏反应，立刻停止使用本产品，并建议去内科医生处治疗。

[使用方法]

1. 用小棉球干燥制备好的窝洞。
2. 用适当器械将本产品填入窝洞并修整外形。如果是咬合面 1 类洞，则让患者做咬合动作并修整外形。
3. 嘱患者闭口。本材料在水分的作用下 30 分钟硬化。嘱患者避免磨损患侧至少 1 小时。

[要点]

1. 不要与其他材料混合或被污染。
2. 去除本材料时，用酒精棉球擦洗窝洞。
3. 用完后立即将罐子盖上。

[储存]

温度：4-25℃（39.2-77.0°F）

保质期：从生产日期开始 2 年

[包装]

罐：30g，白色或粉色。

制造商

而至陶齿工业株式会社

日本国爱知县春日井市鸟居松町 2-285

中国大陆售后服务单位

而至齿科（苏州）有限公司

江苏省苏州工业园区青丘街 127 号，邮编：215021

电话：0512-62831516 传真：0512-62833089

执行标准：

YZB/JAP1574-2008《亲水性暂封材》

中华人民共和国医疗器械注册证注册号：

国食药监械（进）字 2008 第 3631090 号