

Miracle Mix

银粉玻璃离子水门汀

RADIOPAQUE SILVER ALLOY-GLASS IONOMER CEMENT RESTORATIVE

银合金放射线阻射性玻璃离子水门汀

仅供口腔专业人士应用。

适应症：

1. 桩核修复。
2. 乳牙龋的充填。
3. 需要充填体具有 X 射线阻射的患者。
4. 垫底。
5. I 类窝洞、局限性 II 类窝洞或暂时充填。

禁忌证：

1. 盖髓。
2. 对玻璃离子有过敏史的患者禁用，如发生过敏请速到内科医师处就诊。

使用方法：

1. 粉/液配比

将银粉合金粉倒入玻璃离子粉瓶中，仔细摇匀。

- a. 标准粉/液配比为 2/1，或 3 平匙粉比 2 滴液。
- b. 为精确的取得粉剂，可用手轻拍瓶底，不可摇晃或倒置瓶子。
- c. 将液瓶垂直倒置，轻轻挤出液体。
- d. 用完后迅速盖紧瓶盖。
- e. 经常振荡粉剂瓶子。

2. 调拌：

将粉剂和液剂置于调和纸或玻璃板上，把粉剂分为两等份，将第一等份与液体在 15-20 秒内混合均匀，随后把剩下的一份粉剂加入，仔细调和 20 秒。

3. 充填：

- a. 制备洞型，不必制备严格的机械固位。
- b. 用水冲洗窝洞，干燥窝洞但不必过分干燥。建议使用富士牙本质调理剂或富士窝洞调理剂，以去除粘污层。如需盖髓请使用氢氧化钙制剂。
- c. 调拌适量材料，操作时间在 23℃ 为 1'30"，温度的增高会缩短操作时间。
- d. 去除牙体表面水分，但不要过分干燥。
- e. 将材料用特殊的输送器或充填器缓慢放入窝洞，避免混入气泡。
- f. 从调拌开始到固化约为 5'00"或 5'30"。

4. 修整和磨光：

使用标准方法。

包装：

1. 1-1 套装

15g 玻璃离子粉	1 瓶
10g (8.0ml) 液	1 瓶
17g 银合金粉	1 瓶
小量匙	1 个
调拌纸	1 本
塑料调刀	1 把

2. 单粉装：15g 玻璃离子粉 1 瓶，小量匙 1 个

3. 单液装：10g (8.0ml) 液 1 瓶

注意事项:

1. 如接触口腔粘膜或皮肤, 迅速用酒精棉球擦去, 并用清水冲洗。
2. 如接触眼睛迅速用清水冲洗, 并尽快就诊。
3. 本品不可与其他玻璃离子制品混合使用。

储存:

放置于荫凉干燥处, 温度 4-25℃。

避免阳光直接照射, 保质期: 粉剂三年, 液剂二年。

制造商

株式会社而至

日本国东京都板桥区莲沼町 76-1

电话: +81-3-35585182

中国售后服务单位

而至齿科(苏州)有限公司

江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

电话: 0512-62831516 传真: 0512-62833089

注册产品标准编号

YZB/JAP 3154-2006 《银粉玻璃离子水门汀》

中华人民共和国医疗器械注册证注册号:

国食药监械(进)字 2007 第 3630459 号(更)