

使用前请仔细阅读说明书

产品名称：研磨材料

规格型号：NEW METAL STRIPS

生产厂商：GC DENTAL PRODUCTS CORPORATION.

生产地址：2-285, Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

售后服务：而至齿科（苏州）有限公司

经营地址：江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

联系方式：电话：0512-62833083 传真：0512-62833089 邮编：215126

注册证号：国食药监械（进）字 2008 第 1633405 号

执行标准：YZB/JAP4714-2008《研磨材料》

推荐牙科专业人士按照说明书使用。

主要结构

在薄的金属片上粘接氧化铝颗粒, 用于适用范围内的目的。

禁忌症

无

适用范围

1. 打磨抛光牙间隙充填材料
2. 牙齿分离。
3. 邻接牙齿的制备。

使用方法

- a) 选择适当的型号。
- b) 插入牙齿间隙
- c) 轻轻用力进行来回打磨

注意

1. NEW METAL STRIPS有锐利的边缘, 请佩戴手套进行保护; 要注意避免伤害病人的口腔粘膜、脸, 等等。
2. 可以重复使用。使用超声波清洗机进行清洗, 或火烧清静; 然后采用高压或化学方法进行消毒。
3. 使用次数不限, 在感觉研磨材料临床使用效果不好的情况下, 请更换新的产品。

型号

1. #200 粗糙度;(红色的) #300粗糙度;(蓝色的) #600粗糙度;(绿色的) #1000粗糙度.(黄色的)
2. 宽度 - A(2.6 毫米); B(3.3 毫米); C(4.0 毫米); 长度 - 133 毫米。
3. 厚度 - #200(140 微米); #300(90微米); #600(70微米); #1000(50微米)。

包装

1. 相同的粗糙度- 12条包装 (3个宽度, A, B 和 C, 各4条)
2. 相同的粗糙度- 12条包装(12 条-全部同一宽度)

3. 套装—每盒12条（不同粗糙度和宽度各一条）

储存条件

研磨材料应保管在无腐蚀性气体和通风良好的室内。