

## 而至快速自凝基托树脂（GC Unifast Trad）

而至快速自凝基托树脂是一种快速自凝多用途的丙烯酸树脂，可应用于加压或微压力加工技术。仅限于口腔专业人士应用。

### 适应症：

1. 义齿的修理。
2. 制作暂时冠。
3. 制作个别托盘。
4. 正畸活动矫治器和其他广泛用途。

### 禁忌症：

对丙烯酸树脂过敏者禁用，如发生过敏现象，应及时到内科医生处就诊。

### 使用方法：

#### A. 加压法

建议粉液比（粉/液）为 1g 粉/0.5ml 液，即粉剂量器 1 个刻度和液剂量器 1 个刻度。

1. 将适量液体如图倒入橡皮杯。
  - a) 取下瓶盖，将滴管装上（图 1）。
  - b) 将液体（图 2）倒入量杯，直至液面如图 3 所示达到适当的刻度。
  - c) 拧紧瓶盖以防止挥发。
2. 混合后 20—30 秒，混合物会达到面团期。所有操作应在固化前，即混合后 2 分钟之内完成。

#### B. 无压力法

使用标准方法。

### 储存：

在荫凉干燥处保存，温度 4-25℃

避免放置于阳光直射下，保质期三年。

### 注意事项：

1. 本品不能与其他品牌的粉剂或液剂混合使用。
2. 使用后用纱布擦去残留的树脂。
3. 用干布擦去泄漏的液剂。

### 包装：

1. 粉剂瓶：35g, 100g, 250g, 1kg。
2. 液剂瓶：100g(104ml), 250g(260ml)。

### 颜色：

1. 牙冠色：象牙色，深象牙色，浅象牙色。
2. 牙龈色：粉色#3，深粉色#4，自然浅粉色#6，自然深粉色#7，仿生粉色#8(血丝)，粉色 X。

### 警告：

1. 液剂高度易燃。远离火源。
2. 一旦接触眼睛。立刻用大量清水冲洗，并去眼科医生处就诊。

### 制造商

株式会社而至

日本国东京都板桥区莲沼町 76-1

### 中国大陆售后服务机构

而至齿科（苏州）有限公司

江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

电话:0512-62831516 传真:0512-62833089

执行标准：YZB/JAP 0405-2005《快速自凝基托树脂》

中华人民共和国医疗器械注册证注册号：国食药监械（进）字 2005 第 3632051 号(更)