

义齿贴合点指示剂 II 型

【禁忌·禁止】

混用禁忌：参照相互作用处

【型号】FIT CHECKER II

【主要结构组成或者成分】

概要

· 本材料为主要用于检测修复体不良接触部位口腔检测材料。

形状（主要成分）

- 基质：膏体状（乙烯基硅橡胶、二氧化硅）
- 催化剂：膏体状（乙烯基硅橡胶、二氧化硅、铂催化剂）
- 阻滞剂：液体状（乙烯基硅橡胶）

原理

· 基质和催化剂的混合，使之进行交联反应，固化。

【适用范围】

FIT CHECKER II 是专门用来检测修复体的不良接触部位的口腔检测材料。

1. 全冠：边缘、邻面、咬合面；
2. 铸造桩：桩贴合点；
3. 嵌体：边缘以及邻面；
4. 全口或局部义齿：粘膜面。

【性能指标】

	参考值
调和时间	不大于 20 秒
固化时间	3 分 30 秒

【使用方法等】

- 1) 在调拌纸上挤出等长的基质膏体和催化剂膏体，调和 20 秒，直到颜色一致。（如果室温偏高会导致材料固化速度过快，可加入适量的阻滞剂进行调和。）
- 2) 将调和物堆筑在铸造冠的内面、邻接面，或在活动义齿基托的组织面堆筑后放置口腔内，等其固化。
- 3) 固化后，从口腔内取出，判断修复体的适合性。

【有关使用方法中的注意事项】

- 1) 请勿将本材料与其他硅橡胶产品混合使用（材料反应的种类不同，会出现固化延迟或是不固化的情况）
- 2) 本产品如用于硅橡胶类软质内衬材料面时，容易发生黏连，所以请避免用于硅橡胶类的软质内衬材料面。
- 3) 其他义齿贴合点指示剂中的阻滞剂不能用于本材料，请使用本品专配的阻滞剂。
- 4) 进行高点测试，避免口腔内过于干燥。
- 5) 本产品具有很好的流动性，在进行高点测试，请确保产品不会流入咽喉部。
- 6) 注意：不同的温度会对固化时间产生影响。
- 7) 注意：增减催化剂不能调节固化时间。

【使用中的注意事项】

- 1) 使用注意
- ① 勿将本品用于对硅橡胶有发疹、皮炎等过敏病史

的患者。

- ② 对本品有过敏症状的患者，请勿使用本品。
- ③ 医师使用本品如发生起疹等过敏症状时，应停止使用并立即接受医生诊断治疗。
- ④ 注意：基质、催化剂、阻滞剂不可进入眼睛里，一旦进入眼睛应立即用流水冲洗，并及时接受眼科医生的诊断治疗。（否则可能造成眼睛伤害）
- ⑤ 使用本品时，由牙科医生判断是否适用于患者的症状。
- ⑥ 制取印模后，将唾液、血液充分冲洗干净，根据需要进行消毒。（否则可能导致感染）
- ⑦ 请勿将基质和催化剂的瓶盖盖错。管的颜色和瓶盖的颜色如下所示。
基质：白色
催化剂：绿色
（基质与催化剂接触后会发生固化）
- ⑧ 本品附着在衣物上后，不易清除，请避免本品沾染到衣物上
- ⑨ 请勿与其他产品混用。
- ⑩ 请勿将本材料用于【适用范围】记载以外的用途。
- ⑪ 没有牙科医师资格证书者请勿使用本品。

2) 相互作用

(1) 【混用禁忌】（勿混用）

在义齿贴合点指示剂 II 的调和物中如混入或是接触了以下的材料，会引起固化延迟。

- 如使用乳胶手套接触了基牙、牙面也会导致本产品固化延迟。
- 缩合型硅橡胶印模材料的催化剂
（例如：而至 FLEXICON）
- 多硫化钠印模材料
（例如：而至 cheurflexF）
- 丁香酚类材料
（例如：而至 印模膏）
- 其他乳胶手套、水分、甘油

【贮藏·保管方法及使用期限等】

【贮藏·保管方法】

- 使用后请及时密封，放置在阴凉处储存。
- 需要避光保存。
- 加强管理，以防牙科从业人员之外的人员接触本材料。

【使用期限】

本品应在包装记载的使用日期*前使用。

*（如 EXP 2022-02 表示使用期限到 2022 年 2 月。）

有效期：24 个月

生产日期：见包装

【包装规格】

【单品包装】

基质：50g（50mL）

催化剂：65g（50mL）

【套装】

基质：50g（50mL）

催化剂：65g（50mL）

阻滞剂：3g

调和纸：1 本

【注册人及代理人的住所及联络方式等】

注册人名称：而至陶齿工业株式会社

注册人住所：爱知县春日井市鸟居松町 2 丁目 285 番地

生产地址：爱知县春日井市鸟居松町 2 丁目 285 番地

代理人/售后服务单位名称：而至齿科（苏州）有限公司

代理人/售后服务单位住所：苏州工业园区青丘街 127 号

电话：0512-62833083 传真：0512-62833089

邮编：215126

医疗器械注册证编号：国械注进 20162175101

产品技术要求编号：国械注进 20162175101

说明书修订日期：2021 年 10 月 版本号：05