

托盘粘接剂

GC ADHESIVE

在使用之前，请仔细阅读使用说明。

【颜色 形状】

颜色：蓝色

形态：液状

【使用用途】

通过托盘粘接剂的使用，能提高硅橡胶印模材料与托盘的粘粘强度，防止印模材料与托盘脱模。

【操作方法】

将托盘内侧清洗干净并充分干燥，用涂抹刷在托盘上涂抹出平整的薄层，放置大约 5 分钟，或者使用气枪完全吹干，再使用硅橡胶印模材料贴合至托盘上。

【注意事项】

- 1) 不要将本品用于[使用用途]以外的用途。
- 2) 请妥善保管本品，以防牙科专业之外的人员接触本品。
- 3) 为防止患者的交叉感染，涂抹粘结剂的毛刷或棉球仅限一次使用，请勿重复使用。
- 4) 由于本产品易燃，请避免在火源附近使用，注意在通风良好的地方使用。

【使用上的重要注意事项】

- 1) 使用中，对本品有发疹等过敏症状的患者，请立即停止使用，并接受医生诊治。
- 2) 对本品有发疹，皮炎等过敏症状的医生，请勿使用本品。另外，使用中如若产生过敏症状，请立即停止使用，并接受医生诊治。
- 3) 使用中如不小心附着于皮肤，请用清水冲洗，如有发疹等过敏现象，请及时接受医生治疗。
- 4) 注意不要将本品流入眼睛。若不慎误入眼内，立刻用大量的流水冲洗干净后，接受眼科医生诊断。
- 5) 注意不要误饮本品。若不慎误饮，立刻漱口。不要过分使之呕吐，及时接受医生诊治。
- 6) 本产品一定条件下可能产生蒸发，使用时请佩戴口罩进行操作，如误吸入蒸发气体造成不适，请及时移至空气清新且安静的场所。根据需要，请及时接受医生诊治。

【保管方法及使用期限】

[保管方法]

- 1) 本产品易燃，请注意保存在远离火源的场所。
- 2) 建议存储于阴暗通风环境，避免光照直射、避开高温多湿的场所。
- 3) 本产品应妥善保管、保存，避免牙科从业人员之外的人员接触本产品。

[使用期限]

请在包装记载的 EXP 日期之前使用本品

※(例 EXP. 2019-08 表示的使用期限是 2019 年 8 月为止)

使用期限：3 年

生产日期：见外包装

【包装】 8g/瓶

【进口商】

而至株式会社

日本国东京都板桥区莲沼町 76 番 1

【制造商】

旭陶齿工业株式会社

日本国爱知县春日井市胜川町 1 丁目 3-3

【中国售后服务单位】

而至齿科（苏州）有限公司

江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

电话：0512-62833083

传真：0512-62833089

邮编：215126

说明书修订日期或版本：021900B04