

口外研磨材料

GC LAPPING PASTE

【形状·构造以及原理等】

形状

软膏，根据研磨材料成分的不同分为黑色（陶瓷牙用）和淡绿色（树脂齿、陶瓷牙精研磨用）两种

- 黑色（陶瓷牙用）：软膏（中空圆柱状）50g
- 淡绿色（树脂牙、陶瓷牙精研磨用）：软膏（中空圆柱状）55g

构造

本品为含有磨粒的固态软膏体研磨材料。

原理

在义齿制作过程中，在咬合器上的义齿表面涂布一层本品，通过常规方法进行侧方运动等，切削研磨义齿咬合面。

主要成分

- 黑色：碳化硼、矾土
- 淡绿色：碳化硅、矾土

磨粒

- 黑色：#320
- 淡绿色：#280~#320

【预期用途】

在口外用于研磨抛光修复体，使其表面平滑均匀。

【使用方法等】

（研磨操作之前的准备）

- 1) 将甘油滴入本品中空部，约至7、8分刻度位置。
- 2) 本品的中空部分会逐步溶解于甘油中。标准混合比应为1g本品与0.5ml甘油，混合至混合物呈滴状下落时即可。（下次使用时，也应使用同样的操作手法，将本品溶解然后混合。）

（研磨操作）

- 1) 在人工齿咬合面上涂布一层混合后的糊状本品。
- 2) 按照通法，在左右两侧、前方及中间部位进行滑走运动研磨。
- 3) 按照通法，通过侧方运动来进行研磨。
陶瓷的研磨回数标准
 - 黑色 约100回
 - 淡绿色（精磨用）约50回树脂牙的研磨回数标准
 - 淡绿色（精磨）目视检查确认，直至表面光滑为止。
- 4) 研磨过程中，一边水洗一边观察研磨程度，根据必要再进行继续研磨，研磨结束后，充分水洗，用刷子等刷去残留磨粒。

[关于使用方法的注意事项]

- 1) 不要将本品用于口腔内。
- 2) 树脂牙只用淡绿色款研磨即可。
- 3) 甘油容易与磨粒分离，使用之前应充分混合。
- 4) 也可以用水代替甘油与磨粒进行混合，但请尽可能使用药店正规甘油。

【使用时的注意事项】

1) 重要的基本注意

- ① 对本品有过发疹、皮炎等过敏病史的患者，禁止使用本品。或在使用过程中有过敏症状时，立即停止使用，并接受医生诊断。
- ② 注意不要让本品进入眼睛，万一不慎入眼，立即用大量的流水洗净，并接受医生诊断。
- ③ 使用本品时，为规避粉尘对人体的影响，请佩戴正规标准的防尘口罩。
- ④ 使用本品时，为防止对眼睛造成损伤，请佩戴保护眼镜。
- ⑤ 有发疹、皮炎等过敏症状的人或长时间使用本品时，请佩戴橡胶手套。
- ⑥ 使用之后的容器应立即密封盖紧。
- ⑦ 禁止与其它产品混用。
- ⑧ 不要将本品用于【预期用途】中记载以外的用途。
- ⑨ 齿科从业者以外的人员禁止使用本品。

【贮藏·保管方法及使用期限等】

[保管方法]

妥善保管本品，以防牙科从业者以外的人员取得。

[使用期限]

请在包装上记载的日期前使用。

※（例 EXP.2020-08，表示的使用期限为2020年8月）

有效期：10年

生产日期：见外包装

【备案人及代理人的相关信息】

备案人名称：而至陶齿工业株式会社

备案人住所：爱知县春日井市鸟居松町二丁目285番地

联系方式：0120-416480

生产地址：爱知县春日井市胜川町1丁目3番地3

代理人/售后服务单位名称：而至齿科（苏州）有限公司

代理人/售后服务单位住所：江苏省苏州工业园区青丘街127号

电话：0512-62833083 传真：0512-62833089

产品技术要求编号：国械备 20190271 号

医疗器械备案凭证编号：国械备 20190271 号

说明书修订日期或版本号：031900B04