

基托蜡

GC PARAFFIN WAX

【形状、构造及原理等】

形状： 板状

500g/盒

1kg/盒

1kg/盒×10盒（10kg）

主成分： 石蜡、蜜蜡、棕榈酸蜡、达玛树脂

原理： 加热使可塑性扩大、可软化、融解，
冷却后，可恢复加热前的可塑性。

特 性：

项目	规格	参考值
流变性	23℃	1.0%以下
	37℃	5.0%~90.0%
（试验方法：JIS T 6502）		

【使用目的及效果】

用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。

【使用方法】

- 1) 将板状基托蜡用火加热，适度软化时卷成棒状。
- 2) 将棒状蜡做成马蹄形，放置在基础基托上。
- 3) 过多或过少部分，通过填补、切削完成咬合基托。
- 4) 咬合基托的调整、人工齿的排列、蜡义齿的制作遵照一般做法作业。

[使用方法相关注意事项]

获取咬合记录时，请注意预防过热引起烫伤。

【使用上的注意事项】

1) 重要注意事项

- ① 取得咬合记录后，充分洗净血液、唾液后，根据需要进行消毒[有可能引起感染]。
- ② 本产品可燃，使用时，注意不要引起烫伤。
- ③ 注意不要和其他产品混用。
- ④ 请在使用场所配备灭火器。
- ⑤ 本品，请不要用于[使用目的及效果]以外的用途。
- ⑥ 无牙科资格证者请勿使用本品。

【保管方法及使用期限等】

[保管方法]

- 请于室温下保管本品。
- 本品请勿置于高温场所（火炉旁、阳光可直射场所等）。
- 本品请保管于严禁烟火的场所，同一场所请勿过量保管。

• 请在保管场所配备灭火器。

• 请妥善保管本品，以防牙科从业人员之外的人员接触。

[使用期限]

本产品应在包装上记载的使用日期前使用。

（如 EXP 2018-08，表示使用期限到 2018 年 8 月）

使用期限：3 年

【备案人及代理人的相关信息】

备案人名称：而至株式会社

备案人住所：东京都文京区本乡3丁目2番14号

生产地址：群馬县桐生市东久方町 2-6-33

联系方式(客服电话)：0120-416480

代理人/售后服务单位名称：而至齿科(苏州)有限公司

代理人/售后服务单位住所：江苏省苏州工业园区青丘街 127 号

电话 0512-62833083 传真 0512-62833089

产品技术要求编号：国械备 20181046 号

医疗器械备案凭证编号：国械备 20181046 号

说明书修订日期及版本：071800B04