

齿面处理剂

【禁忌·禁止】

勿将本品用于对聚丙烯酸有发疹、皮炎等过敏病史的患者。

【型号、规格】

25 g (23.8 mL) /瓶

【主要结构组成或者成分】

形状
·液体

主要成分

·纯净水、聚丙烯酸溶液。

【原理】

用聚丙烯酸溶液清洗牙体表面。

【适用范围】

用于齿面、窝洞成型后牙本质表面的清洁。

【性能指标等】

项目	性能要求	参考值
pH	1.6-2.4	2.0

【使用方法等】

- 1) 清洗、烘干成型后的窝洞。
- 2) 将本品取出放入容器中，用附带的海绵涂布在窝壁上。
- 3) 涂布保持 20~30 秒后，立刻水洗，并使其烘干。
- 4) 根据病症，使用各种玻璃离子粘结剂填充或是做衬底。

【使用方法相关注意事项】

- 1) 使用气体注射器等干燥齿面以及处理剂类处理齿面时，请事先确认在该齿面上没有油雾等妨碍粘结的物质之后，再进行干燥。[因为这些妨碍粘结的物质会降低粘结力]。
- 2) 使用本品涂布牙本质超过 30 秒后，牙本质小管会有开口现象，避免长时间操作。

【使用上的注意事项】

- 1) 使用注意（以下患者谨慎使用）
 - ① 对药品、食品、饰品、化学物质等有过敏病史的患者，即使对本品及类似品没有过敏病史，也要先行问诊，谨慎使用。
- 2) 重要的基本注意事项
 - ① 对本品有发疹、皮炎等过敏史的患者，切勿使用本品。此外使用中发生过敏时，应立即停止使用并接受医生诊断。
 - ② 对本品有发疹、皮炎等过敏史的术者，切勿使用本品。

此外使用中发生过敏时，应立即停止使用并接受医生诊断。

③注意一定不要让本品的液体或调和物接触口腔粘膜、皮肤等。使用橡皮障等防止与口腔粘膜、口唇的接触(使用橡皮障等不能防止接触的部分，建议涂抹防湿材等)。不慎沾在口腔粘膜上时，立刻用棉球擦拭，完成操作后用大量的水冲洗。粘在皮肤上时，立刻用流水冲洗干净。万一进入眼睛里时，立刻用大量的流水冲洗干净，并接受眼科医生诊断。

④注意一定不要误饮本品。

⑤不要与其他产品混用。

⑥液体容器的喷嘴上沾有液体时，请用湿纱布等擦拭干净。[因为可能会导致盖子打不开]

⑦取出液体后，立即将盖子拧紧。

⑧不能将本品用于【适用范围】中记载的用途之外的地方。

⑨没有牙科医疗资格者请勿使用本品。

【保管方法及使用期限等】

[贮藏·保管方法]

·避免日光直射，在室温下保管。

·应严格进行保管管理，避免牙科从业者之外人员接触本品。

[使用期限]

本品应在包装记载的使用日期※前使用。

※(例  2025-09-05 表示的使用期限是至 2025 年 9 月 5 日)

有效期: 3 年

[生产日期]见外包装。

【包装】

[单品包装]

液体 1 瓶=25 g (23.8 mL)

【标签上图形、符号的解释】

: 生产批号

: 使用期限

【注册人及代理人的住所及联络方式等】

注册人名称: 而至株式会社

注册人住所: 东京都文京区本乡三丁目 2 番 14 号

生产地址: 静冈县骏东郡小山町中日向 584 番 1 号

注册人联系方式(客服电话): 0120-416480

DENTIN CONDITIONER

代理人/售后服务单位名称：而至齿科（苏州）有限公司

代理人/售后服务单位住所：苏州工业园区青丘街 127 号

联系电话：0512-62833083 传真：0512-62833089

邮编：215126

原产地：日本

医疗器械注册证编号：国械注进 20152172745

产品技术要求编号：国械注进 20152172745

说明书修订日期：2023 年 6 月 版本号：05