


GC 双膏剂推进器

GC Fuji Luting CD Plunger

【主要结构组成或者成分】

形状:

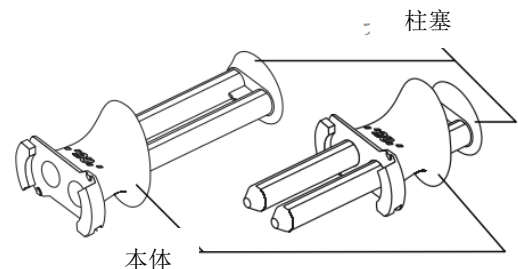

材质:

名称	材质
本体	聚甲醛树脂 (POM)
柱塞	聚甲醛树脂 (POM)

【原理】

按压柱塞，从而推出注射筒内的糊剂。

【适用范围】

用于推出专用注射筒内的糊剂。

【使用方法等】


- 1) 装卸注射筒的时候，拉动柱塞，确保柱塞的前端收到本体内。
- 2) 注射筒安装到 GC Fuji Luting CD plunger 的注意事项：
 - ① 对准 GC Fuji Luting CD plunger 嵌合部 ▲ 标记和 注射筒 ▲ 标记。
 - ② 对准 ▲ 标记，以此点为中心，进行旋转安装。
- 3) 拆下注射筒的帽盖，并确认注射筒的安装状态没有偏差和不合适。
- 4) 按压并推送柱塞的后端中心部位，将糊剂推出到调拌纸上。

高压灭菌的处理，请按照以下任一条件进行：

115℃～118℃：30 分钟

121℃～124℃：15 分钟

126℃～132℃：10 分钟

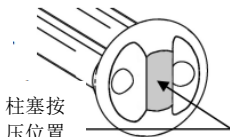

[使用方法中的注意事项]

- 1) 为确保左右注射筒内糊剂的取用量适当，要确保注射

筒安装适当。

- 2) 安装注射筒后，初次使用时请先推出一定量的糊剂，均衡左右糊剂的推出量。
- 3) 取用糊剂时，切勿松开柱塞。
(若松开柱塞，糊剂可能会被吸回注射筒中，造成左右糊剂的取用量不均匀。)
- 4) 取下注射筒时，需待柱塞完全复位后，再向和安装方向相反的方向旋转注射筒取下。
- 5) 安装注射筒的方向要始终保持一致。(安装方向若发生变化，会导致无法取用适合量的左右糊剂，可以通过对准 GC Fuji Luting CD plunger 嵌合部 ▲ 标记和注射筒 ▲ 标记，确定方向。)
- 6) 如果推出量较少的话，说明左右糊剂的均衡度不稳定，需要注意。
- 7) 注射筒过冷的情况下，请放置达到常温后再使用。
- 8) 初次使用，或者长期不用后再使用，进行注射筒的按压操作时，请注意按压柱塞的力度。(如果用力过大，可能会使推出的量过多，超过需要量。)

【使用上的注意事项】

- 1) 重要的基本注意事项
 - ① 某些化学溶液的浸泡或者消毒，可能会导致变色，但不影响使用。
 - ② 关于清洁液、消毒液、灭菌器的使用，请按照厂家要求规范使用。
 - ③ 高温高压器灭菌时，请勿使用超过 132℃的机型。
 - ④ 高温高压器灭菌后，需待本品完全冷却后再使用。
 - ⑤ 请勿用于【适用范围】以外的用途。
 - ⑥ 牙科医疗资格者以外的人员禁止使用本品。

【保管方法及使用期限等】

[保管方法]

- 1) 应妥善保管和管理本品，避免牙科从业者以外的人员接触。
- 2) 避免阳光直射，请放置阴凉处保管。

[使用期限]

有效期：不适用

生产日期：见外包装。

【包装】

1 个/盒

【出口商及制造商信息】

出口商：而至株式会社

住 所：东京都文京区本乡三丁目2番14号

电 话：0120-416480

制造商：而至株式会社

地 址：日本静岡県骏东郡小山町中日向584番1

【进口商信息】

名称：而至齿科（苏州）有限公司

住所：江苏省苏州市工业园区青丘街127号

电话：0512-62833083

传真：0512-62833089

邮编：215126

原产国：日本

说明书修订日期：2022 年 8 月

版本号：01